

Verpacken des AQUATEC OCEAN mit 24“-Rädern

A. ZUBEHÖR / accessories:

1. **AQUATEC OCEAN** mit 24“-Rädern / *with 24“-wheels*
2. Transporttasche (Art.-Nr. 16521) / *transportation bag (order no. 16521)*
3. Verpackungsanleitung (5 Seiten) / *packing instruction (5 pages)*

B. VERPACKUNGSREIHENFOLGE / packing order:

1. Beide Seitenteile in die Tasche legen. *Put both side parts in the bag.*



2. Beide Fußstützen in die Tasche legen. *Put both footrests in the bag.*



Verpacken des AQUATEC OCEAN mit 24“-Rädern

3. Die Sitzplatte mit der Oberseite nach unten in die Tasche legen.
Put the seat plate upside down in the bag.



4. Die 24“-Räder jeweils mit der Innenseite nach unten in die Tasche legen. Der Bolzen des oben liegenden Rades wird durch die Speichen des unteren Rades geführt. **Die Bolzen dürfen nicht entfernt werden!**
*Put the 24“-wheels with the inside down in the bag. Lead the bolt of the upper wheel through the spokes of the lower wheel. **Do not remove the bolts!***




Verpacken des AQUATEC OCEAN mit 24“-Rädern

5. Verpacken des Sitzgestells / *packing of the seat frame:*

Bevor das Sitzgestell verpackt wird, werden die Clips der Höhenverstellung in das Gestell eingesteckt.

Before you put the seat frame in the bag insert the clips of the height adjustment in the frame.

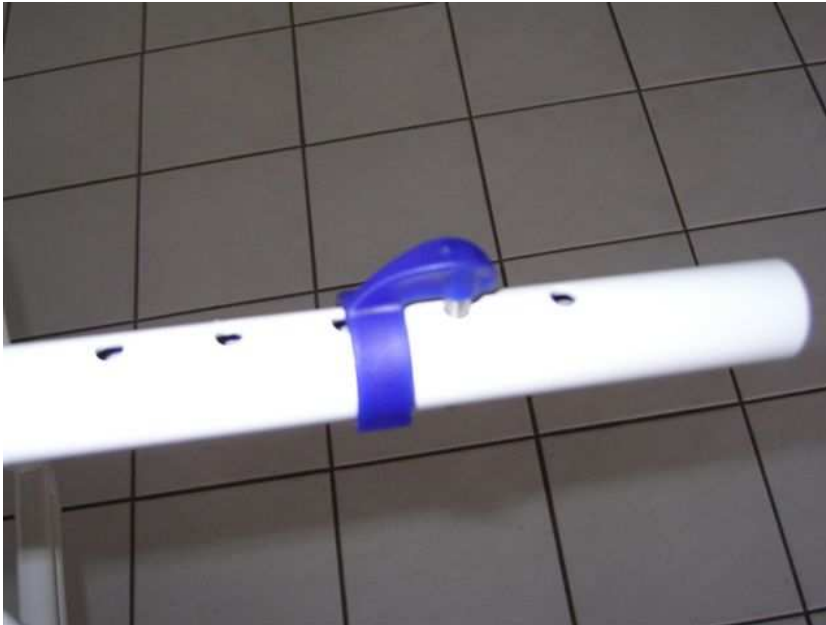


Das Sitzgestell wird in die Tasche auf die 24“-Räder gelegt.

Now you can lay the seat frame on the 24"-wheels.



Verpacken des AQUATEC OCEAN mit 24“-Rädern

Dabei wird ein Verstellrohr durch die Speichen der Räder geführt. Die drei übrigen Verstellrohre werden an den Seiten der Sitzplatte vorbeigeführt.
In doing so lead one adjustment tube through the spokes of the wheels. Direct the remaining three adjustment tubes to the sides of the seat plate.

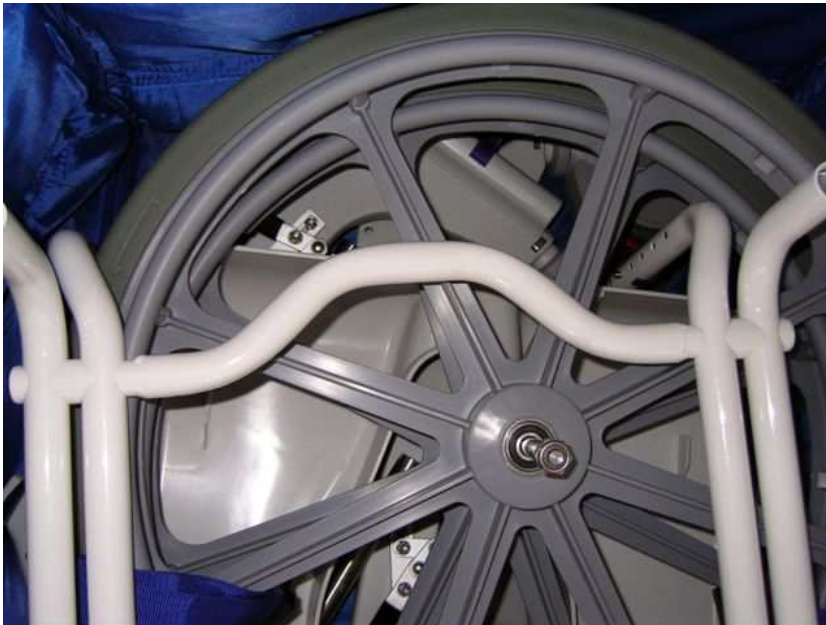

6. Verpacken der Rückenlehne / *packing of the backrest:*

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben in die Bohrungen ein.
Fasten the screws in the holes.



Verpacken des AQUATEC OCEAN mit 24“-Rädern

Die Rückenlehne wird mit der Vorderseite nach unten auf die 24“-Räder gelegt. Dabei zeigt der Handgriff zum Deckel der Tasche.

Put the backrest with the front side down on the 24“-wheels. The handle shows to the lid of the bag.

