

A. ZUBEHÖR / *accessories*

1. **AQUATEC OCEAN** mit Lenkrollen / *with castors*
2. Transporttasche (Art.-Nr. 16521) / *transportation bag (order no. 16521)*
3. Verpackungsinstruktionen (7 Seiten) / *packing instructions (7 pages)*

B. VERPACKUNGSREIHENFOLGE / *packing order*

1. Beide Seitenteile in die Tasche legen.
Put both side parts in the bag.



2. Beide Fußstützen in die Tasche legen.
Put both footrests in the bag.



Verpacken des AQUATEC OCEAN mit Lenkrollen / *with castors*

3. Die Sitzplatte mit der Oberseite nach unten in die Tasche legen.
Put the seat plate upside down in the bag



4. Bevor das Sitzgestell verpackt wird, werden die Clips der Höhenverstellung in das Gestell eingesteckt.
Before you put the seat frame in the bag insert the clips of the height adjustment in the frame.



Verpacken des AQUATEC OCEAN mit Lenkrollen / *with castors*

5. Das Sitzgestell mit den Verstellrohren nach unten in die Tasche legen.
Put the seat frame in the bag, the adjustment tubes showing down.



Dabei müssen die Verstellrohre an der Sitzplatte und den Seitenteilen vorbeigeführt werden.

In doing so direct the adjustment tubes to the sides of the seat plate and the side parts.



Verpacken des AQUATEC OCEAN mit Lenkrollen / *with castors*

6. Verpacken von Toilettentopfhalter und Toilettentopf / *packing of sanitary pan and holder.*

Der Toilettentopfhalter wird zwischen Sitzgestell und Sitzplatte gelegt.
Put the holder between the seat frame and the seat plate.



Der Toilettentopf wird zwischen Sitzgestell und Sitzplatte auf den Toilettentopfhalter gelegt.
Lay the sanitary pan on the holder between seat frame and seat plate.



Verpacken des AQUATEC OCEAN mit Lenkrollen / *with castors*

7. Verpacken der Rückenlehne / *packing of the backrest:*

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben in die Bohrungen ein.
Fasten the screws in the holes.



Legen Sie die Rückenlehne mit der Vorderseite nach unten in die Tasche. Die Armlehnen klappen dabei an den Seiten von Sitzgestell und Sitzplatte vorbei.
Put the backrest with the front side down in the bag. The armrests flap to the sides of seat frame and seat plate.



Verpacken des AQUATEC OCEAN mit Lenkrollen / *with castors*

8. Verpacken des Softsitzes / *packing of the softseat:*

Legen Sie den Softsitz mit der Unterseite nach unten auf die Rückenlehne.
Put the softseat with the bottom side down on the backrest.



Der Stopfen für den Softsitz kann in den entstandenen Zwischenraum an der Stirnseite der Tasche gesteckt werden.
The insert for the softseat can be put in the gap at the front side.



Verpacken des AQUATEC OCEAN mit Lenkrollen / *with castors*

9. Schließen der Gurte / *fastening of the belts*:

Schließen Sie beide Gurte und ziehen sie fest.
Fasten both belts and tighten them.



Beim Schließen der Gurte ist darauf zu achten, dass alle verpackten Teile umschlossen und die Gurte nicht verdreht sind.
Take care that all parts are included and the belts are not twisted when fastening them.

