

P452E/3 - BANJO**! SÄKERHET**

- Det är förbjudet att stå på rollatorn samt att använda den för persontransport
- Sitt aldrig på rollatorn och sparka dig fram med fötterna.
- När du sitter på rollatorn skall båda bromsarna vara i **parkeringsläge**.
- Parkeringsbromsarna ska vara i bromsat läge när rollatorn används som stöd när man reser sig upp från tex. en stol.
- Rollatorn skall vara helt utfälld och låst när du går med den. OBS! Användes endast som gångstöd.
- Iakttag försiktighet vid gång på lutande mark.
- Gå inte upp eller ner i trappor med rollator.
- Använd inte rollatorn i rulltrappor.
- Iakttag försiktighet när korgen är tungt lastad.
- Last är endast avsedd att transporteras på lasthyllan, i korgen eller på brickan. Maxlast på lasthyllan är 7 kg, i korgen 9 kg och på brickan 5 kg.
- Körhandtagen får **inte** vinklas utåt då detta medför att rollatorns sidostabilitet försämras.

TILLBEHÖR

- A) Montering av korgen.
B) Montering av brickan med plasttappar.

MONTERING

Innan rollatorn monteras ska den tvärgående plaststången mellan bakhjulen och eventuella plastpluggar i sidorörens tas bort.




1. Fäll ut rollatorn i körklart läge (se nedan).
2. Montera låsspaken med skruv. Låsspaken med bricka skall monteras på utsidan. Var noga med att klacken på skruven hamnar i spåret på fästet.
3. För in handtagens rör i sidorören och dra åt låsspakarna. Dessa skall vara riktade nedåt under användning.
Se avsnitt **KÖRHANDTAG** sid 3.

KÖRKLART LÄGE

Tryck rollatorn nedåt tills fällspärren, placerad till höger under sitsen, låser.
OBS! Kontrollera alltid att fällspärren är i låst läge.


HOPFÄLLNING

1. Fäll ut fällspärren
2. Lyft tvärröret under sitsen uppåt.
OBS! Var aktsam på klämrisken mellan bak- och framstativet.

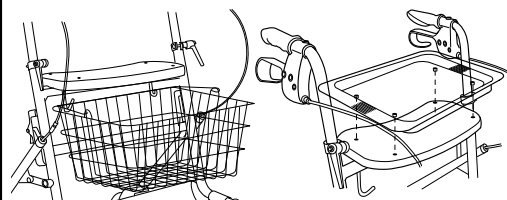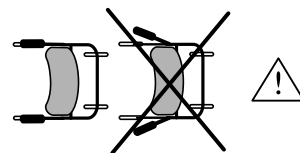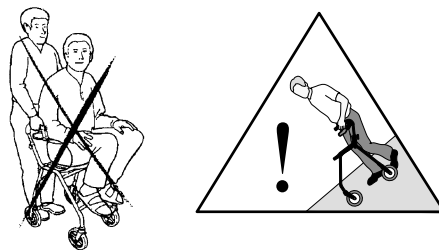



A

B

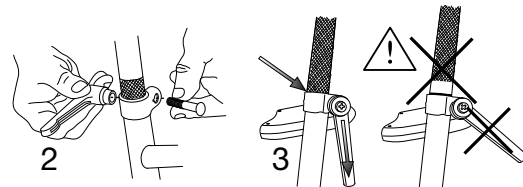

2

3



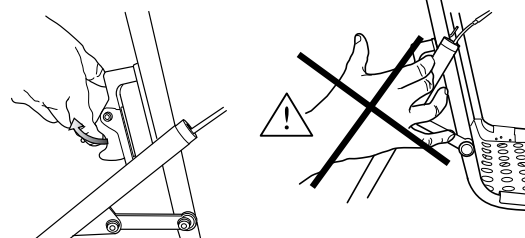
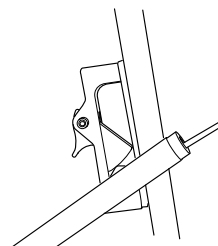
**P452E/3 - BANJO****BROMSAR**

Drag båda bromshandtagen uppåt för färdbröms.

PARKERINGSBROMS

Tryck bromshandtagen mjukt nedåt för parkeringsläge. Ett tydligt klick markerar att bromsen är i rätt läge. Det är viktigt att båda bromsarna sätts i parkeringsläge när de skall användas.

För att frigöra parkeringsbromsen, dra bromshandtagen uppåt.

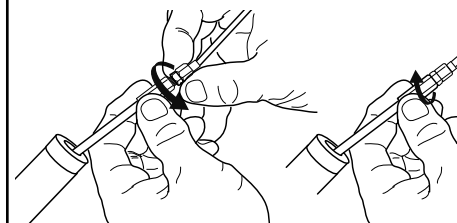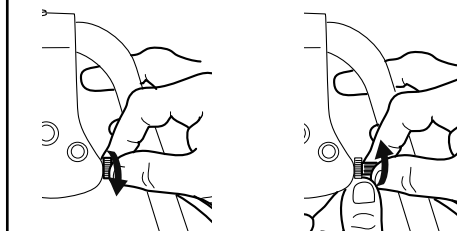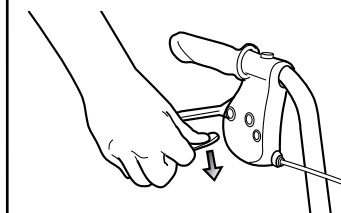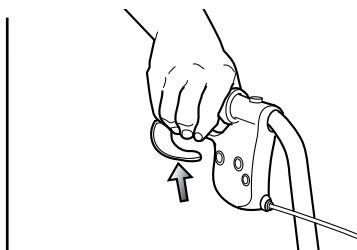**JUSTERING AV BROMSVERKAN**

Två justerskruvar, en i bromshandtaget och en mitt på bromsvajern justerar bromsens spänning och anpassar inbromsningen till brukarens förmåga. Bromskraften ökar och nödvändig rörelse i bromshandtagen minskar när justerskruvarna skruvas utåt.

OBS! Kontrollera bromsverkan efter höjdställning.



OBS! Var noga med att dra åt kontramuttrar efter justering.

KÖRHANDTAG

OBS! Körhandtagen skall vara riktade rakt bakåt vid användning av rollatorn. De får under inga omständigheter vinklas utåt.
För höjjustering av handtagen:

Lossa låsspakarna och justera handtagen till lämplig höjd. OBS! Handtagen får aldrig justeras över sitt högsta läge, markerat med lätttring på rören.

- Dra åt låsspakarna. Dessa skall därefter justeras så att de pekar nedåt. (Låsspakarna kan vridas fritt genom att först dras utåt). Kontrollera att handtagen är lika högt inställda. Normalt skall handtagen vara placerade i handledshöjd.

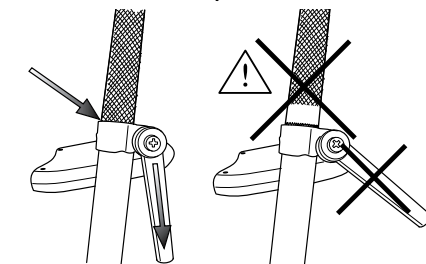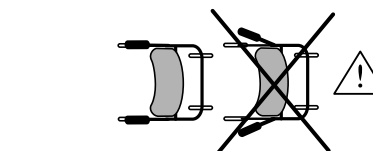

UNDERHÅLL – SÄKERHET

För att upprätthålla funktion och säkerhet bör Du regelbundet se till att nedanstående åtgärder utföres:

- Gör rent rollatorn med vanliga rengöringsmedel. Torka den torr. Håll hjulen rena.
 - Kontrollera att skruvar och reglage är ordentligt åtdragna.
 - Om Din rollator inte är i fullgod funktion - tag genast kontakt med Din ordinator.
- Defekt rollator får inte användas. Gör inga ingrepp själv!


OBS! Användes enbart som gångstöd. Användarens maxvikt: **P452E/3 - BANJO** 130 kg.
För ingrepp i rollatorn (anpassningar, bristfälliga reparationer), utanför **DOLOMITES** kontroll, ansvaras ej.

ANVISNING FÖR DESTRUKTION AV PRODUKT OCH FÖRPACKNING:


När produkten är förbrukad ska denna med tillbehör samt förpackningsmaterialet sorteras på rätt sätt. De enskilda delarna kan separeras och hanteras enligt materialbeteckningen.

På etiketten på **P452E/3 - BANJO** finns all viktig teknisk information.

- 1: Artikelnummer
- 2: Produktnamn
- 3: Serienummer
- 4: Tillverkningsdatum
- 5: Max brukarvikt
- 6: OBS! Se bruksanvisning.
- 7: In- och utomhus rollator.
- 8: Max bredd på rollator.
- 9: Tillverkarens namn.

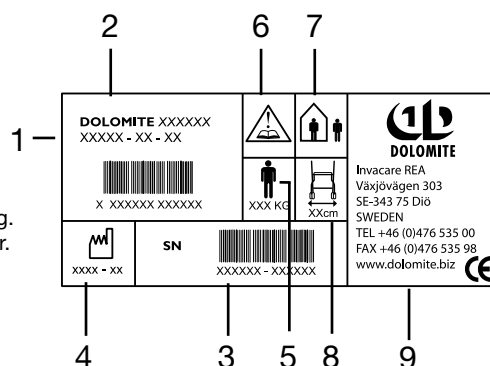

- A 60 cm
- B 71-98 cm
- C 39 cm
- D 39 cm
- E 61 cm
- F 69 cm

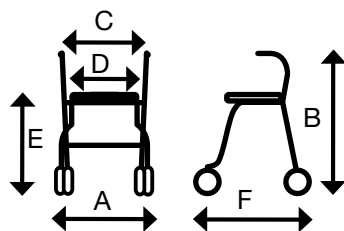

Diameter fram- och bakhjulen: 19 cm
Vikt utan tillbehör: 8,5 kg
Vikt med tillbehör: 9,5 kg



Tillverkare:
Invacare REA, Växjövägen 303, SE-343 75 Diö, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 98, www.dolomite.biz

Säljbolag:
Invacare AB, Fagerstagatan 9, 163 53 Spånga,
TEL +46 (0)8-761 7090, FAX +46 (0)8-761 8108, www.invacare.se



P452E/3 - BANJO

Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport.



BRUKSANVISNING

Läs noga igenom bruksanvisninge före användning.
Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk.

